



Solution de communication Artone 3 MAX
Le dispositif à induction Bluetooth ®

www.artonecs.com

Manuel d'instructions

Introduction :

L'Artone 3 MAX est un système d'écoute portable sans fil. Equipé de la technologie Bluetooth, l'Artone 3 MAX se connecte facilement sans fil à de nombreux appareils. L'Artone 3 MAX permet aux utilisateurs d'aides auditives ou d'implants cochléaires de bénéficier d'une écoute amplifiée et de profiter de conversations téléphoniques sans bruits. Profitez également de la musique stockée sur votre téléphone portable, ordinateur ou tablette grâce à la fonction Bluetooth.

Compatibilité :

L'Artone 3 MAX est compatible avec toutes les aides auditives et les implants cochléaires équipés de la fonction T-coil. L'Artone 3 MAX est compatible avec les téléphones portables équipés de la fonction Bluetooth et avec d'autres appareils qui supportent habituellement les casques Bluetooth ou oreillette mains libres, ainsi que les profils A2DP et AVRCP.

La plage de fonctionnement :


L'Artone 3 MAX utilise le protocole Bluetooth classe 2, la distance maximale de fonctionnement est de 10 mètres dans un espace ouvert.

Note :

1. La musique : La source audio doit prendre en charge le profil Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
2. Télécommande : La source audio doit prendre en charge le profil Bluetooth AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).
3. L'utilisation du téléphone : Le téléphone doit prendre en charge le profil Bluetooth HSP (profil casque) ou (profil mains-libres).
Attention : Certains téléphones portables ne prennent pas en charge la fonction de commutation de connexion Bluetooth entre la musique et l'appel.
4. L'utilisation de l'ordinateur : L'ordinateur doit prendre en charge le profil Bluetooth HSP (profil casque).
5. TV : Pour les téléviseurs non compatibles Bluetooth, l'utilisation du périphérique Artone TVB ou TVB+ sera nécessaire.

Pour toutes les sources audio qui ne prennent pas en charge la technologie Bluetooth®, l'utilisation du périphérique Artone TVB ou TVB+ sera nécessaire.

Présentation du produit :

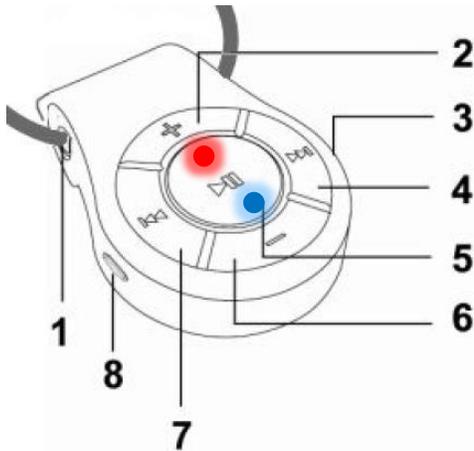

1. Collier inductif
2. Volume +
3. Microphone
4. Suivant
5. Bouton multifonctions (BMF) / Lecture/ Pause
6. Volume -
7. Précédant
8. Connexion chargeur

Comment charger l'Artone 3 MAX ?

L'Artone 3 MAX est équipé d'une batterie rechargeable intégrée. Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie pendant 2 à 3 heures. L'Artone 3 MAX possède une autonomie de 4 à 5 heures en communication et plus de 150 heures en veille.

Instructions pour le chargement :

- Connectez le câble d'alimentation USB sur la connexion chargeur (8). Pendant la charge, le voyant s'allume en rouge.
- Une fois que l'Artone 3 MAX est chargé, le voyant rouge s'éteint et le voyant bleu s'allume. Vous pouvez alors débrancher le chargeur de la source d'alimentation.

Indication des voyants :

- Le voyant reste allumé en rouge tant que l'Artone 3 MAX est en cours de charge. Lorsque la batterie est entièrement chargée, le voyant rouge s'éteint et le voyant bleu s'allume.
- Le voyant clignote en rouge lorsque la batterie est faible.

Comment utiliser l'Artone 3 MAX avec votre téléphone portable ?

Mise sous tension :

Lorsque l'Artone 3 MAX est éteint, appuyez longuement sur le bouton BMF (5) et maintenez-le jusqu'à ce que le voyant clignote en bleu.

Mode appairage :

Lorsque l'Artone 3 MAX est éteint, appuyez longuement sur le bouton BMF (5) et maintenez-le jusqu'à ce que les voyants bleu et rouge clignotent alternativement (environ 7 secondes). L'Artone 3 MAX entrera alors en mode appairage.

Appairage avec un téléphone portable :

En mode appairage, la distance entre le téléphone portable et l'Artone 3 max doit être inférieure à 1 mètre (3 pieds). Appuyez longuement sur le bouton MBF (5) de l'Artone 3 MAX jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu clignotent alternativement (environ 7 secondes). Allez dans le menu Bluetooth de votre téléphone portable, activez la fonction « Recherche nouveau périphérique », puis sélectionnez « Artone 3 MAX » dans la liste des périphériques trouvés. Dans le cas où votre téléphone vous demande de rentrer une clé d'authentification, saisissez le code Bluetooth « 0000 ».

NOTE : Une fois que l'appairage est effectué, la connexion entre l'Artone 3 MAX et le téléphone portable se fera automatiquement dès que les appareils seront en marche et que la fonction Bluetooth du téléphone sera activée.

Recevoir un appel :

Pour prendre un appel entrant, appuyez brièvement sur le bouton MBF (5) de l'Artone 3 MAX.

Fin d'appel :

Pour mettre fin à un appel téléphonique, appuyez brièvement sur le bouton MBF (5) de l'Artone 3 MAX.

Rejeter un appel entrant :

Pour rejeter un appel entrant, appuyez longuement (2 secondes) sur le bouton MBF (5) de l'Artone 3 MAX.

Recomposer un numéro :

En mode veille, pour recomposer le dernier numéro sortant, appuyez brièvement deux fois sur le bouton MFB (5), le dernier numéro sera alors composé et un "bip" sonore signal viendra confirmer l'opération.

La numérotation vocale :

En mode veille, appuyez longuement (2 secondes) sur le bouton MFB (5) pour activer la fonction de numérotation vocale.

Fonction musicale :

- Lecture/Pause : En mode veille, appuyez brièvement sur le bouton MFB (5) pour activer le mode lecture, appuyer de nouveau pour mettre sur pause.
- Précédent/Suivant : Appuyez brièvement sur les touches Précédent (7) /Suivant (4)
- Volume +/- : Appuyez brièvement sur les touches +/- pour diminuer ou augmenter le volume.

Mise hors tension :

Appuyez longuement (3 secondes) sur le bouton MFB (5) jusqu'à ce que le voyant rouge commence à clignoter puis maintenez jusqu'à ce que le voyant rouge s'éteigne.

Double connexion :

L'Artone 3 MAX est capable de prendre en charge deux connexions en même temps.

Vous pouvez utiliser deux téléphones portables en même temps ou alors un téléphone portable et un transmetteur Artone TVB ou TVB+.

1. Coupler un deuxième téléphone portable :

Une fois l'Artone 3 MAX appairé avec un premier téléphone portable, éteignez l'Artone 3 MAX. Puis appuyez sur le bouton MFB (5) jusqu'à ce que les voyants bleu et rouge clignotent alternativement (environ 7 secondes). Cela signifie l'Artone 3 MAX est en mode appairage. Entrez dans le menu Bluetooth du deuxième téléphone portable, activez la fonction « Recherche nouveau périphérique », puis sélectionnez « Artone 3 MAX » dans la liste des périphériques trouvés. Dans le cas où votre téléphone vous demande de rentrer une clé d'authentification, saisissez le code Bluetooth « 0000 ».

2. Après l'appairage du deuxième téléphone portable, le premier téléphone portable sera automatiquement déconnecté de l'Artone 3 MAX. Pour connecter à nouveau le premier téléphone portable, vous devrez refaire un nouvel appairage avec le premier téléphone portable. Une fois l'appairage effectué, les deux téléphones portables seront alors connectés à l'Artone 3 MAX.

NOTE : Les fonctions « Recomposer un numéro » et « Numérotation vocale » fonctionneront uniquement depuis le premier téléphone portable appairé.

Dépannage

Si vous ne parvenez pas à connecter votre Artone 3 MAX avec votre périphérique audio Bluetooth, essayez les étapes ci-dessous :

- Vérifiez que votre Artone 3 MAX est chargé et allumé.
- Vérifier que votre Artone 3 MAX est en mode appairage lorsque vous essayez de le coupler avec votre périphérique.
- Vérifier que votre Artone 3 MAX ne soit pas déjà appairé avec le transmetteur Artone TVB ou TVB+.
- Vérifiez que la fonction Bluetooth de votre périphérique est activée. Référez-vous au manuel utilisateur de votre périphérique pour obtenir les instructions.
- Vérifiez que l'Artone 3 MAX soit dans un rayon maximum de 10 mètres (environ 30 pieds) de votre périphérique Bluetooth et qu'il n'y a pas d'obstacles tels que des murs, ou d'autres appareils électroniques.

IMPORTANT : Pour réinitialiser l'Artone 3 MAX, branchez le câble d'alimentation USB sur la connexion chargeur (8) pendant 3 à 5 secondes, puis le débrancher. Cela permettra de réinitialiser votre Artone 3 MAX.

Si vous n'entendez aucun son une fois l'appairage effectué :

- Vérifiez que votre aide auditive/implant cochléaire soit bien équipé de la fonction T-coil.
- Vérifiez que la fonction T-coil soit bien activée sur votre aide auditive/implant cochléaire.

Dans le cas où le son est trop faible, augmentez le volume sur le téléphone portable et sur l'Artone 3 MAX. Si le niveau sonore n'est toujours pas suffisant, contactez votre audiologiste et demandez-lui d'augmenter l'intensité/amplitude de votre aide auditive/implant cochléaire.

Avertissement :



- **Ne pas plier le cordon du collier inductif. Plier le cordon peut endommager le produit et annuler la garantie.**
- **Ne pas utiliser le collier inductif à proximité d'une machine qui pourrait attraper et coincer le dispositif (risque d'étranglement).**
- **Consultez votre médecin avant d'utiliser un dispositif à induction (boucle) si vous portez un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif qui pourrait être sensible aux champs magnétiques.**
- **Faites preuve d'une extrême prudence en conduisant et respectez les lois de votre état/pays concernant l'utilisation du téléphone portable au volant.**
- **Gardez hors de portée des enfants.**