



Soluções de Comunicações Artone

Artone 3 MAX

streamer

www.artonecs.com

Manual de Instruções

Introdução

O Artone 3 MAX é um dispositivo auxiliar de audição wireless portátil com tecnologia wireless incorporada.

Ele permite que os utilizadores de aparelhos auditivos oiçam a conversa telefónica amplificada e sem ruído e desfrutem de música estéreo transmitida de telemóveis, computadores ou tablets por Bluetooth.

Compatibilidade

O Artone 3 MAX é compatível com todos os aparelhos auditivos e implantes cocleares equipados com a função t-coil assim como com os telemóveis ou outros dispositivos com Bluetooth® que sejam compatíveis com os auscultadores Bluetooth®, mãos livres, perfis A2DP e AVRCP.

Alcance de Funcionamento

O Artone 3 MAX tem um alcance de funcionamento de 10M em um espaço aberto.

Observações:

***1 Musica** – A fonte áudio precisa de ser compatível com o Bluetooth A2DP (Perfil Avançado de Distribuição Áudio).

***2 Controlo Remoto** – A fonte áudio precisa de ser compatível com o Bluetooth AVRCP (Perfil De Controlo Remoto de Áudio e Vídeo).

***3 Uso por Telemóvel** – O telemóvel precisa de ser compatível com o Bluetooth HSP (Perfil de Auscultadores) ou (Perfil mãos livres)


- Alguns telemóveis não são compatíveis com a mudança de ligação Bluetooth entra a música e a chamada.

***5 Uso por Computador** – O computador precisa de ser compatível com o Bluetooth HSP (Perfil auscultadores).

***6 TV** – para TV's que não sejam compatíveis com Bluetooth – É necessário um adaptador adicional no dispositivo, Artone **TVB** ou **TVB+**

Para todas as fontes áudio que não sejam compatíveis com o Bluetooth®
É necessário um adaptador adicional no dispositivo (Artone TVB)

Resumo do Produto

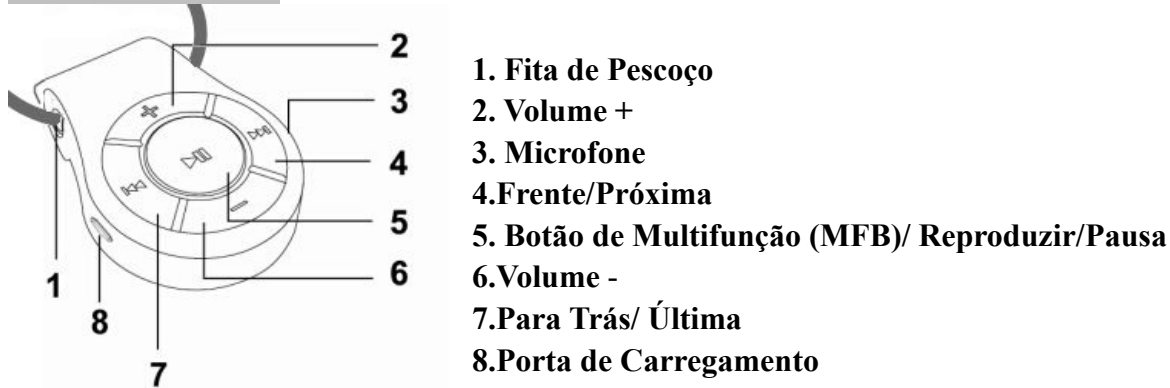

Como Carregar o Artone 3 MAX

O Artone 3 MAX tem uma bateria incorporada recarregável.

Antes do primeiro uso, carregue a bateria completamente durante 2–3 horas.

O Artone-3 consegue fornecer até 4-5 horas de tempo de audição e mais de 150 horas em tempo de espera.

Introdução de Carregamento

- 1) Conecte as portas de carregamento de energia (8) com a fonte de energia (carregador USB). Quando estiver a carregar, o LED vermelho ligará.
- 2) Quando os auscultadores estiverem completamente carregados, o indicador LED vermelho DESLIGAR-se-á e o LED azul ligar-se-á.
Desconecte o carregador da fonte de energia.

Indicação de Bateria

O LED vermelho continuará LIGADO enquanto o Artone 3 MAX estiver a ser carregado. Quando a bateria estiver completamente carregada, o LED vermelho DESLIGAR-se-á e o LED azul ligar-se-á.

O LED vermelho piscará continuamente quando a energia da bateria estiver baixa.

Como usar o Artone 3 MAX com o seu telemóvel

Ligado

Enquanto o Artone 3 MAX está desligado, pressione e prima o botão MFB até que o indicador LED azul comece a piscar.

Entrar no modo de emparelhamento

Quando o Artone 3 MAX está desligado, pressione e prima o botão MFB até que o indicador LED azul e vermelho comecem a piscar alternativamente. O Artone 3 MAX entrará no Modo de Emparelhamento.

Emparelhar com o Telemóvel

A distância de emparelhamento entre o telemóvel e o Artone 3 MAX deve estar dentro de 1 metro.

Pressione MFB e o Artone 3 MAX até as luzes azuis e vermelhas comecem a piscar alternativamente. Uma

vez que o emparelhamento inicial estiver completo, a conexão entre os dispositivos será feita automaticamente depois dos dispositivos estarem ligados e a função Bluetooth do telemóvel estiver ativada.

No seu telemóvel, no diretório de menu Bluetooth ative a função de procurar, “encontrar novo dispositivo”, escolha o “Artone 3 MAX” da lista de dispositivos encontrados, seguindo as instruções. No caso de o telemóvel pedir um código de entrada insira por favor 0000. (quatro zeros)

Receber uma chamada

Para receber uma chamada, pressione o botão multifunção do Artone 3 MAX.

Terminar uma chamada

Depois da chamada terminar, pressione o botão multifunção do Artone 3 MAX.

Rejeitar uma chamada recebida

Para rejeitar uma chamada recebida, pressione a função tecla.

Remarcar uma chamada

No modo de espera, para remarcar o último número, pressione duas vezes o botão MFB, o último número será remarcado. Um sinal “bipe” confirmará a operação.

Marcação por Voz

No modo de espera, pressione a tecla MFB durante 2 segundos para ativar a função de marcação por voz.

Função de Música

- Reproduzir/Pausa: No modo de espera, pressione brevemente o MFB para ativar a reprodução de música, de novo para pausar.
- Última/Próxima: Pressione brevemente as teclas Última/Próxima.
- Volume +/-: Pressione brevemente a tecla Volume +/- para diminuir ou aumentar o volume +/-.

Desligado

Pressione e prima a tecla MFB até a luz vermelha começar a brilhar e continue a pressionar a Tecla MFB até o LED vermelho se desligar.

Conexão dupla

O Artone 3 MAX é capaz de ter dois telemóveis conectados ao mesmo tempo.

Pode usar dois telemóveis ao mesmo tempo ou um telemóvel e o adaptador TVB Bluetooth/ microfone TVB+ Bluetooth.

1. Emparelhe o Segundo telemóvel.

Depois de emparelhar o Artone 3 MAX com o primeiro telemóvel, desligue o Artone 3 MAX. Depois pressione o botão MFB do Artone 3 MAX durante 7 segundos até o LED Azul e Vermelho piscar alternativamente. Significa que entrou no modo de emparelhamento. Vá ao menu do Bluetooth do Segundo telemóvel e procure o Artone 3 MAX e emparelhe-o com ele.

2. Depois de emparelhar o Segundo telemóvel, o primeiro telemóvel será desconectado do Artone 3 MAX, por isso precisa de conectar o primeiro telemóvel das definições do telemóvel, para que AMBOS os telemóveis estejam conectados com o Artone 3 MAX.

A última remarcação de número e função de Marcação por Voz apenas funcionará no primeiro telemóvel conectado.

Resolução de Problemas

Se não é capaz de conectar o seu Artone 3 MAX com o seu dispositivo áudio de Bluetooth, por favor tente o seguinte:

- Assegure-se que o seu Artone 3 MAX está ligado e carregado.
- Assegure-se que o Artone 3 MAX está em modo de emparelhamento quando está a tentar emparelhá-lo com o seu telemóvel.
- Assegure-se que o adaptador Bluetooth em transmissão está emparelhado com o Artone 3 MAX.
- Assegure-se que o seu dispositivo permite o Bluetooth. Consulte por favor o manual de utilizador para as instruções.
- Assegure-se que o Artone 3 MAX está dentro de no máximo 10 metros do seu dispositivo Bluetooth e que não existem obstruções, tais como paredes ou outros dispositivos eletrónicos.

Para reconfigurar o Artone 3 MAX por favor insira o cabo de carregamento na porta de carregamento do dispositivo durante 3-5 segundos e desconecte-o. Isto reconfigurará o dispositivo.

Se nenhum som for ouvido depois do emparelhamento estar completo.

- Assegure-se que o seu aparelho auditivo/coclear está equipado com o t-coil.
- Assegure-se que a função T-coil está ligada no aparelho auditivo/implante coclear.
- Se o som estiver demasiado baixo, assegure-se que o volume no telemóvel e o Artone 3 MAX estão aumentados no nível adequado. Se o nível de som ainda assim não for suficiente, contacte por favor um audiologista e peça para aumentar a sensibilidade t-coil do seu aparelho auditivo/ implante coclear.

Aviso

- **O dispositivo é muito intenso, comece sempre com as definições de volume mínimas**
- **Não dobre ou torça o fio extensivamente! Dobrar ou torcer o fio pode causar deterioração no produto e anular a garantia.**
- **Não usar perto de máquinas porque o fio pode ficar preso nas partes em movimento.**
- **Consulte o seu medico antes de usar o conjunto se usa um pacemaker ou qualquer outro dispositivo que seja sensível a campos magnéticos/indutivos.**
- *Manifeste cuidado extra enquanto conduz e obedeça às leis do seu estado/país no que toca ao uso do telemóvel enquanto conduz.
- **Manter longe das crianças.**