




## Artone Soluciones de Comunicación


### Artone 3 MAX & TVB

www.artonecs.com

#### Guía de Inicio Rápido

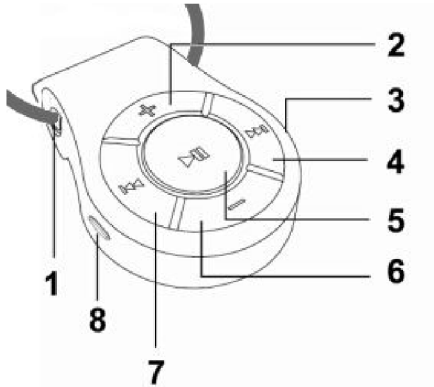

1. Collar
2. Volumen +
3. Micrófono
4. Adelantar/Siguiente
5. Botón Multi-funcional (MFB)/ Reproducir/Pausa
6. Volumen -
7. Retroceder/ Última
8. Puerto de Carga

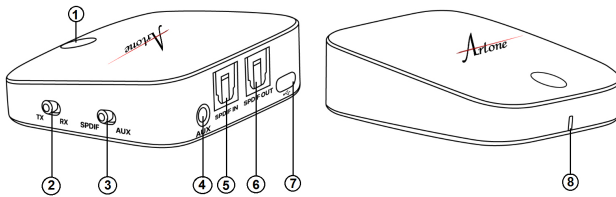

- ① Botón de Encendido
- ② Cambio de Modo Transmisor (TX) / Receptor (RX)
- ③ Cambio de Modo SPDIF / AUX
- ④ Puerto de Audio de 3.5mm
- ⑤ Puerto de Entrada de Audio Óptico
- ⑥ Puerto de Salida de Audio Óptico
- ⑦ Puerto de Carga
- ⑧ Indicador LED

#### Advertencia

- El dispositivo es bastante sonoro, siempre comience con la configuración de volumen mínima.
- ¡No doble o gire el collar extensivamente! Doblar o girar el collar puede causar daño al producto y anular la garantía.
- No usar cerca de maquinaria ya que el collar puede quedar atrapado en las partes móviles.
- Consulte a tu medico antes de usar el producto si usas un marcapasos o cualquier otro dispositivo que pueda ser sensible a campos magnéticos/inductivos.
- \*Preste extra atención cuando maneje y obedezca las leyes de su estado/país sobre el uso del teléfono móvil mientras maneja.
- Mantener Alejado de los niños.

## **Para usar la Serie Artone 3 MAX y TVB.**

### **1. Cargue el Artone 3 MAX**

Antes del primer uso, cargue completamente ambos dispositivos por 2-3 horas.

- 1) Conecte los puertos de carga (7) a una fuente de poder (Cargador USB). Cuando se está cargando, el LED rojo se encenderá.

### **Instrucciones de carga del TVB**

- 2) Conecte los puertos de carga (/) a una fuente de poder (Cargador USB). Cuando se está cargando, el LED rojo se encenderá.

## **Emparejar el Artone 3 MAX y el TVB**

**En el Artone 3 MAX** Desde el estado APAGADO, presione y sostenga el botón **MFB (5)** en el Artone 3 MAX hasta que las luces azules y rojas comiencen a parpadear alternativamente.

### **En el TVB**

1. Asegúrese que el TVB esté configurado en el modo TX y que el dispositivo esté apagado.
2. Conecte el TVB a su TV con el cable apropiado.
3. Encienda el TVB y colóquelo en modo emparejar (presione el botón de Poder dos veces).

Coloque el Artone 3 MAX y el TVB a una distancia de un metro el uno del otro. Los dispositivos se conectarán automáticamente después de varios segundos.

## **Cómo usar el Artone 3 MAX con su teléfono móvil**

### **Encender**

Mientras que el Artone 3 MAX está apagado, presione por un tiempo y mantenga el botón MFB hasta que el indicador LED azul comience a parpadear.

### **Entrar en modo emparejamiento**

Cuando el Artone 3 MAX esté apagado, presione por un tiempo y mantenga el botón MFB hasta que el indicador LED azul y rojo comience a parpadear alternativamente. El Artone 3 MAX entrará en Modo Emparejamiento.

### **Emparejar con el teléfono Móvil**

Artone 3 MAX y el teléfono móvil deben colocarse a un metro (3 pies) de distancia el uno del otro.

Presione el MFB en el Artone 3 MAX hasta que las luces rojas y azules comiencen a parpadear alternativamente. En su teléfono móvil, en el directorio de menú Bluetooth busque la función “encontrar nuevo dispositivo”, elija “Artone 3 MAX” desde la lista de dispositivos encontrados, una vez que aparezca en pantalla. En caso que el teléfono pida una clave, por favor ingrese 0000 (cuatro veces cero)

Encuentre la versión complete de instrucciones de uso en: [www.artonecs.com/ifu](http://www.artonecs.com/ifu)